

Gebruiksaanwijzing voor bestuurder van de Duo-Fiets, een dienst aangeboden door vrijwilligers van :

Versie juni 2020

ZC W
Zorg Collectief Wanroij



De duo_fiets staat bij de ingang van "de lookant"



Vul eerst het registratieformulier in



Na het invullen van het formulier, bel de verpleging, zij vullen het verder in en overhandigen, de tas met de sleutels



U ontvangt deze tas met sleutels



Zwarte sleutel voor zwart kabelslot maak deze los



Groene sleutel is voor groen kabelslot, maak deze los



Neem de sloten mee, en leg deze in het mandje achterop de fiets



Haal de oplaadstekker los, zit achter aan de onderkant van de fiets



Steek de loshangende stekker hiervoor in de plaats



Dit is de contactsteutel, het contact zit aan de onderkant rechts












Gebruiksaanwijzing voor bestuurder van de Duo-Fiets, een dienst aangeboden door vrijwilligers van :

Versie juni 2020

ZC W
Zorg Collectief Wanroij



<p>Steek de sleutel in het contact, draai een kwartslag naar voren, en haal de sleutel er weer uit</p> 	<p>Zet deze rode knop op stand ON</p> 	<p>Als het lampje brand, dan is alles goed aangesloten, en is de ondersteuning ingeschakeld</p> 
<p>Doe de passagier en zelf het veiligheidsvestje aan, veiligheid staat boven alles.</p>	<p>In deze stand staat de fiets op de handrem</p> 	<p>Zet de handrem eraf, door handel naar voren te zetten</p> 
<p>Zet de fiets buiten, en zet de handrem er weer op, laat nu de passagier plaatsnemen, zorg dat de passagier goed zit (verzet eventueel de stoel) Onder de zitting zit een hendel.</p>	<p>Met deze handel, kan de stoel naar voren, of naar achteren, ga op de stoel zitten om te verstellen</p> 	<p>Doe de passagier de veiligheidsgordel om, en zet de arMLEuning naar beneden, zet de spiegel goed voor jezelf.</p>
<p>Zet de versnelling op 1, en fiets aan zonder trapondersteuning, na een paar trappen, de ondersteuning en versnelling gaan gebruiken. Veel fietsplezier</p>	<p>Indien nodig kan er een rollator meegenomen worden, dan eerst de 2 mandjes verwijderen, en zet de rollator vast met de gordel.</p>	<p>Indien de passagier niet kan/wil meetrappen, zet dan de voetplaat naar beneden, en ontkoppel het palletje, met vleugelmoer (zie foto's)</p>
<p>Voetplaat naar beneden, dan kan en hoeft de passagier niet mee te trappen</p> 	<p>In deze stand kan de passagier meetrappen, alleen gebruiken, als passagier dit wil en kan !!!</p> 	<p>In deze stand, staan de pedalen van de passagier stil, is in combinatie met voetplaat naar</p> 

Gebruiksaanwijzing voor bestuurder van de Duo-Fiets, een dienst aangeboden door vrijwilligers van :

Versie juni 2020

ZC W
Zorg Collectief Wanroij

Bij terugkomst, fiets op zijn plaatszetten, zo dicht mogelijk tegen de muur

Bevestig beide kabelsloten, waarvan 1 aan de muur



Zet fiets van contact, sleutel erin en kwartslag naar achteren, daarna sleutel



eruit

Verwissel de stekkers, motorstekker eruit, en oplaadstekker erin.



Controleer het display op de lader, dit teken is ok, lader is goed aangesloten



Als display dit aangeeft, dan is de lader niet aangesloten, controleer nogmaals



Bevestig sleutels aan de tas, lever de tas in bij de verpleging

